

**Est-ce que Fixodent contient du zinc?**

**Les adhésifs pour dentier améliorent-ils l'ajustement de ma prothèse dentaire?**

**Comment agit la crème adhésive Fixodent?**

**Comment agit la poudre adhésive Fixodent?**

**Quelle quantité de crème adhésive Fixodent devrais-je utiliser?**

**Quelle quantité de poudre adhésive Fixodent devrais-je utiliser?**

**Combien de temps l'adhésif est-il efficace?**

**Comment enlever ma prothèse dentaire?**

**Que faire pour éliminer l'adhésif qui reste collé?**

**Quelle est la durée de conservation des adhésifs de prothèse dentaire Fixodent?**

**Fixodent est-il offert en petit format pour sac à main ou en format de voyage?**

**Est-ce que Fixodent contient du zinc?**

Une petite dose de zinc est utilisée dans les adhésifs pour prothèse dentaire Fixodent pour permettre une bonne tenue de la prothèse. Cela permet à la prothèse de bien demeurer en place pour vous permettre de manger, mâcher et parler avec plus de confiance. La quantité de zinc ingérée quotidiennement par un utilisateur moyen d'adhésif Fixodent pour prothèse dentaire représente :

- moins que la quantité de zinc présente dans la plupart des multivitamines quotidiennes;
- moins que la quantité présente dans 6 huîtres (frites ou crues);
- une quantité comparable à celle du zinc contenu dans 170 g de bœuf haché.

[Cliquer ici pour obtenir plus de renseignements au sujet du zinc du Office of Dietary Supplements.](#)

**Les adhésifs pour dentier améliorent-ils l'ajustement de ma prothèse dentaire?**

Oui. Il existe une série d'études cliniques publiées confirmant que les adhésifs pour dentier améliorent l'ajustement d'une prothèse. De plus, l'adhésif peut aider à réduire les risques d'irritation et de douleur localisée causés par le frottement de la prothèse. Contrairement à la prothèse, qui est rigide, les tissus de la bouche sont mous et changent au fil des années. Par conséquent, l'ajustement de la prothèse peut lui aussi changer.

**Comment agit la crème adhésive Fixodent?**

La crème se transforme en une membrane élastique au contact de la salive. Cette membrane confère à la prothèse une tenue solide qui vous permet de bien mordre dans les aliments et de mastiquer naturellement.

**Comment agit la poudre adhésive Fixodent?**

La poudre adhésive Fixodent procure une tenue solide, tout confort, en formant un joint mince et efficace sur la prothèse. Fixodent vous permet de mieux mastiquer, peut aider à réduire l'irritation des tissus et aide à prévenir les situations embarrassantes causées par une prothèse lâche.

**Quelle quantité de crème adhésive Fixodent devrais-je utiliser?**

Appliquez la crème adhésive Fixodent sur la prothèse en de courts traits ou en une série de points en faisant attention de ne pas déposer de produit trop près du bord. Mettez la prothèse en place en appuyant fermement, puis tenez-la pendant quelques instants.

**Conseil :** il se peut que vous deviez modifier la quantité d'adhésif utilisée pour trouver celle qui convient. Pour ce faire, appliquez d'abord une petite quantité pour éviter tout débordement et rajoutez-en pour une tenue supérieure. Essuyez le bec et le capuchon du tube pour éviter qu'ils ne se bouchent.

## Quelle quantité de poudre adhésive Fixodent devrais-je utiliser?

Avant d'appliquer la poudre, veillez à ce que la prothèse soit propre et MOUILLÉE. Le bec de la bouteille est muni d'un petit trou. Appliquez la poudre adhésive Fixodent sur le dentier en pressant délicatement le contenant ou en le tapotant. Pour de meilleurs résultats, couvrez toute la surface du dentier qui entre en contact avec les gencives d'une couche de poudre mince et uniforme. Secouez le dentier pour enlever l'excédent de poudre. Mettez le dentier en place en appuyant fermement, puis tenez-le pendant quelques instants.

**Conseil :** veillez à ce que le bec de la bouteille demeure sec en tout temps, pour qu'il ne s'obstrue pas. S'il venait à se boucher, dégagez-le à l'aide d'une épingle.

## Combien de temps l'adhésif est-il efficace?

La durée de la tenue diffère d'une personne à l'autre. Cependant, Fixodent a été conçu pour tenir toute la journée.

## Comment enlever ma prothèse dentaire?

Plus l'adhésif de prothèse dentaire absorbe d'eau, plus son pouvoir de tenue diminue. Plusieurs techniques peuvent vous permettre de briser le joint qui unit la prothèse à la gencive :

- Pour tout type de prothèse, rincez bien la bouche avec de l'eau tiède ou un rince-bouche tel que Scope<sup>®</sup>.
- Prothèse inférieure, tirez doucement la prothèse tout en effectuant un mouvement de va-et-vient.
- Prothèse supérieure, cette opération peut s'avérer plus difficile en raison de la plus grande surface encollée. Placez le pouce contre la face interne des dents du devant et poussez vers le haut puis vers l'avant en direction du nez.

Si tous vos efforts échouent et si vous ne désirez pas garder votre dentier dans la bouche pendant la nuit, rendez-vous à la salle d'urgence d'un hôpital ou à une clinique dentaire ouverte jour et nuit.

**MISE EN GARDE :** pour éviter toute blessure, utilisez seulement les doigts (et non les ongles) pour enlever la prothèse dentaire.

## Que faire pour éliminer l'adhésif qui reste collé?

Pour éliminer toute trace d'adhésif sur votre prothèse, utilisez un nettoyant pour dentier. Pour enlever tout résidu d'adhésif dans la bouche, brossez le palais et les gencives avec une brosse à soies douces et un dentifrice tel que Crest<sup>®</sup>. Rincez-vous ensuite la bouche avec de l'eau tiède.

## Quelle est la durée de conservation des adhésifs de prothèses dentaires Fixodent ?

La durée de conservation moyenne lorsque conservé à température ambiante est de trois ans.

## Fixodent est-il offert en petit format pour sac à main ou en format de voyage?

Plusieurs détaillants locaux offrent la crème Fixodent Control to Go en formats pratiques pour le voyage.

Pour obtenir plus de renseignements, appelez-nous au 1-800-214-8871.